


Software de Análise Cefalométrica e Plano de Tratamento Ortodôntico

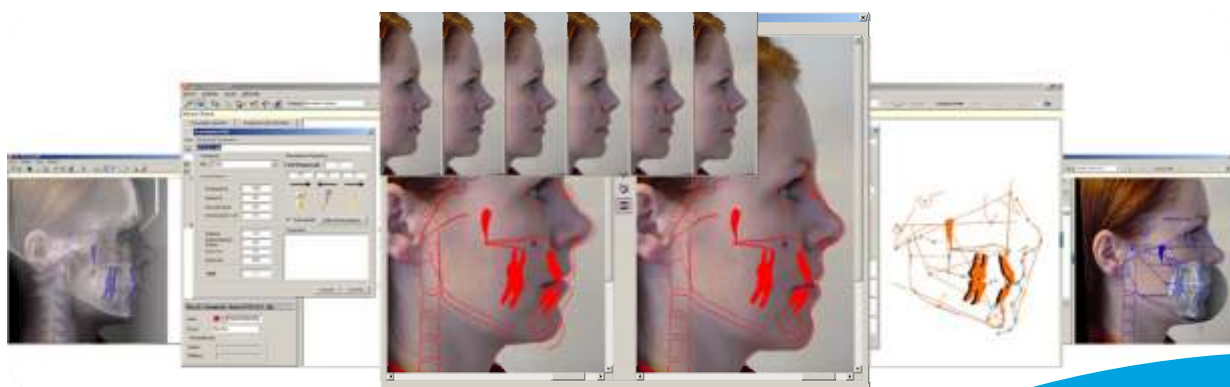

Software de Análise Cefalométrica e Plano de Tratamento Ortodôntico

Software ORTOMED

Com os mais avançados instrumentos informáticos, o ORTOMED é o melhor parceiro do Ortodontista.

O módulo de Gestão do paciente/tratamentos incluído no ORTOMED, é uma ferramenta perfeita e fácil de utilizar, podendo adicionar a cada visita/tratamento toda a informação útil, desde a higiene do paciente, aos arcos e aparelhos utilizados nesse dia, assim como outras observações. A par disso pode ainda incluir para cada visita/tratamento fotografias e radiografias, criando relatórios cefalométricos e fotográficos totalmente individualizáveis.

De forma fácil e muito didáctica poderá mostrar ao paciente quais os planos de tratamento a utilizar, e mostrar-lhe quais as previsões de tratamento. Para além disso poderá explicar ao paciente que estruturas afectam o seu perfil, e como se poderão resolver, utilizando o tratamento ortodôntico ou a cirurgia (módulo cirúrgico incluído no software).


Demore apenas 2 minutos a marcar os pontos cefalométricos (tempo estimado para realização de um traçado), e garanta mais tempo para o que lhe interessa... o Plano de Tratamento!

Características ORTOMED


- dispõe de mais de 50 sistemas de análise cefalométrica, incluindo laterais, frontais e tecidos moles
- análise de modelos: Bolton e Análise de discrepâncias dentoalveolares
- potentes ferramentas para a melhoria e ajuste das imagens (brilho, contraste, zoom, ...)
- sobreposição de diversos traçados cefalométricos, e também sobre as fotos do paciente
- rotação do cefalograma para ajuste ao plano de Frankfurt
- V.T.O. com predição do crescimento
- S.T.O. Cirurgia ortognática
- Morphing e Warping
- efeito transparência da fotografia com a radiografia e efeito de lupa
- impressão dos relatórios e estudos totalmente individualizáveis

Software de Análise Cefalométrica e Plano de Tratamento Ortodôntico

Ficha Diagnóstico



Clinica Dental




HOJA DE DIAGNÓSTICO

Nombre Paciente: Diaz, Juan Edad: 27 Sexo: H
 Doctor: Izquierdo, David Médicos Gonzalez, Miguel

HALLAZGOS CLINICOS			
Dental	C1 1 1	Overjet	Normal
		Overjet	Normal
Mordida Cruzada	13 14 44 45	Dientes Perdidos	34
Apilamiento:	13 24 25 26 27	Protrusiones	11 21 41 31
		Extracciones	38


Radiografias: Lateral Panorámica Periapicales en: 20,26,27
 Fotografias: Semi orto

Maxila

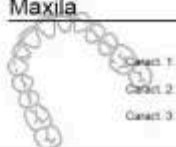

Caract. 1
Caract. 2
Caract. 3

Mandíbula

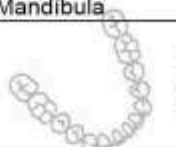

Caract. 1
Caract. 2
Caract. 3

Trabajo realizado: Fotos iniciales + Rx

Próxima visita: Tratamiento

DIAGNÓSTICO
 Maxila estrecha, perfil cóncavo

OBJETIVOS TRATAMIENTO
 1 Expandir maxila, 2 Avance maxila, 3 Alinear

MECANICA
 Expansor + Arco Recto + Retenedor


OBSERVACIONES
 dificultades en el avance de la maxila de 5 mm

Documento Generado por Gesden EVO - Informe

Personalize a sua Ficha Diagnóstico alterando os Logotipos

**Software de Análise Cefalométrica
e Plano de Tratamento Ortodôntico**


Fotografias e Modelos

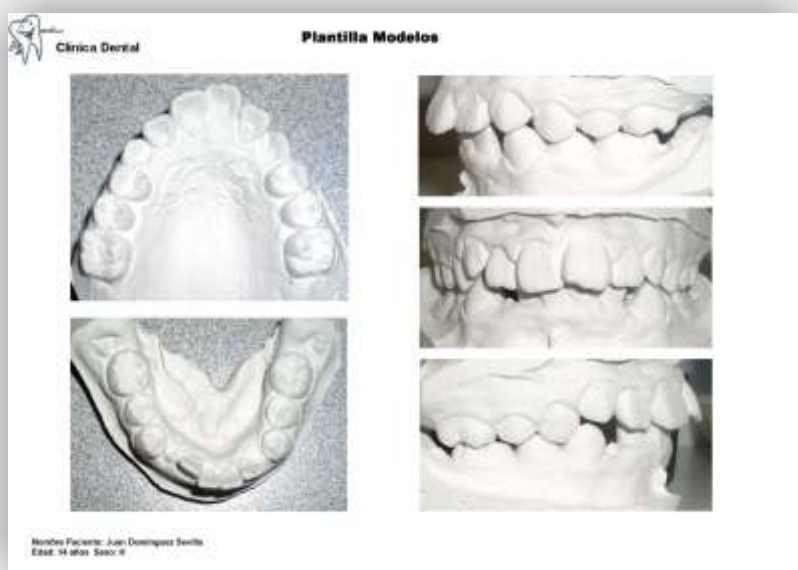


Altere a ordem e disposição das fotografias

Software de Análise Cefalométrica e Plano de Tratamento Ortodôntico

Análise Cefalométrica

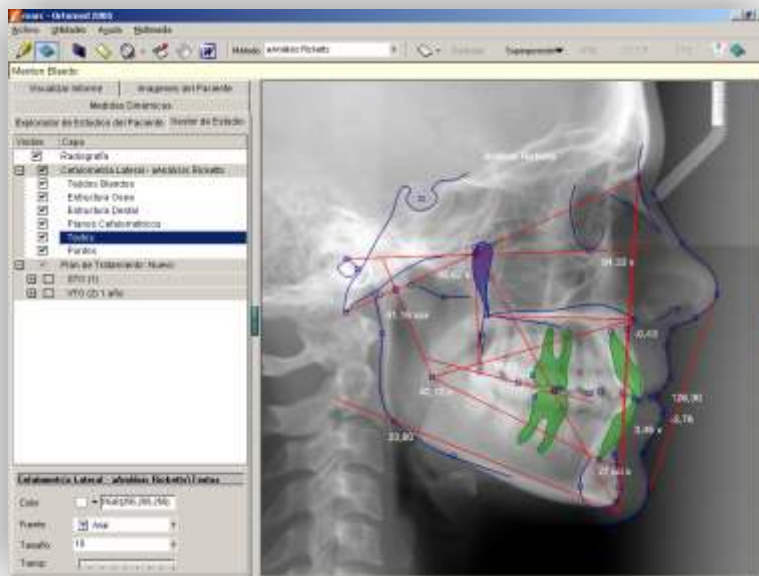


Análise com Relatório Cefalométrico

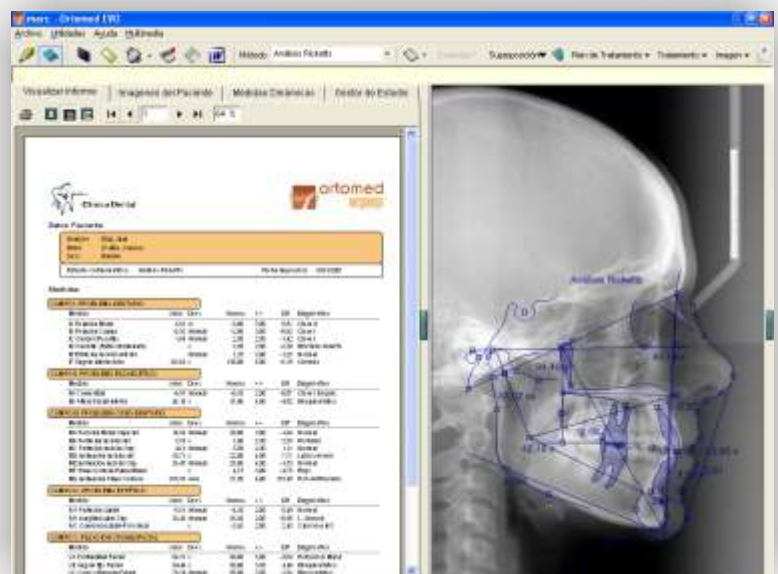


Personalize as cores dos pontos e linhas, assim como as cores e logotipo dos relatórios

Software de Análise Cefalométrica e Plano de Tratamento Ortodôntico

Efeito Lupa

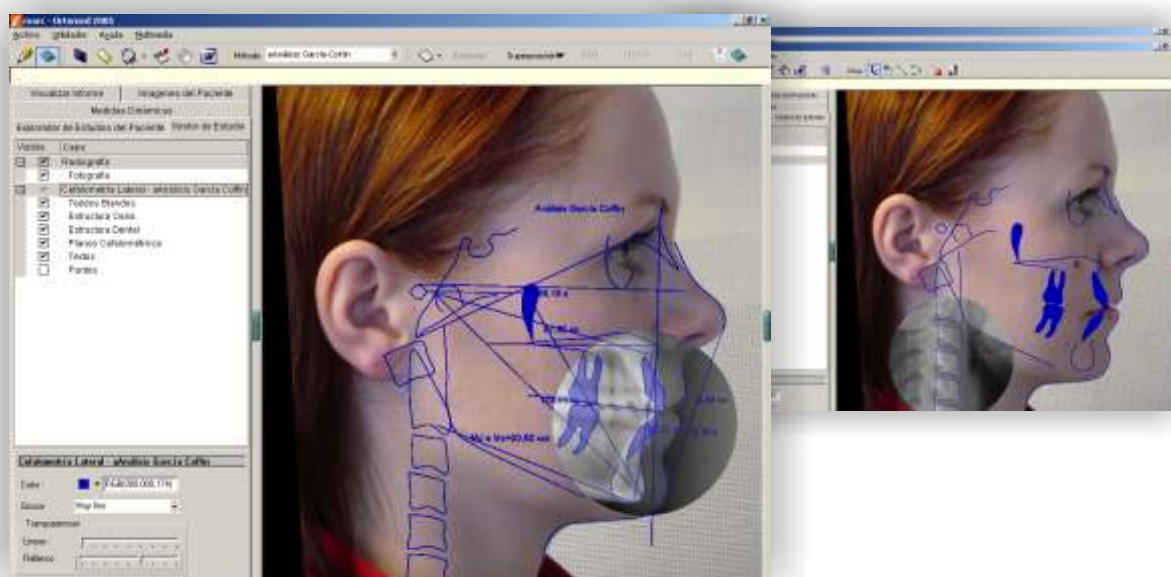


Efeito Transparência

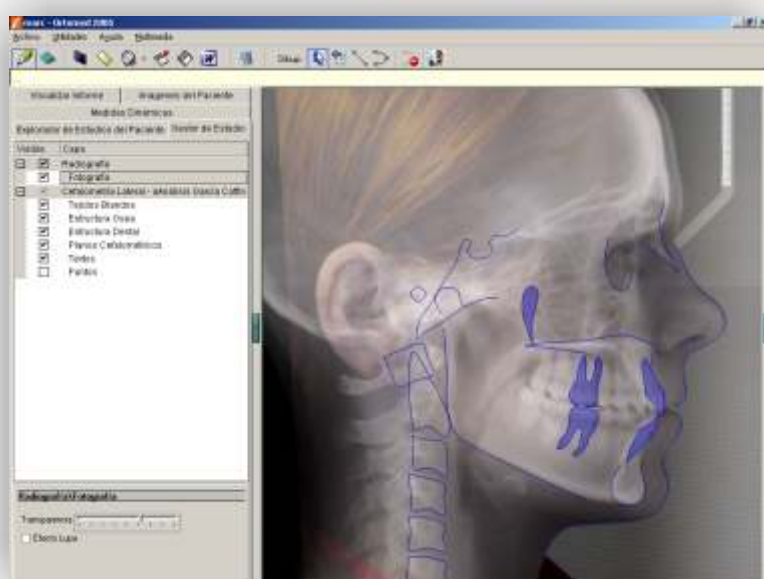


Defina o grau de transparência pretendido

Software de Análise Cefalométrica e Plano de Tratamento Ortodôntico

V.T.O. com Predição de Crescimento

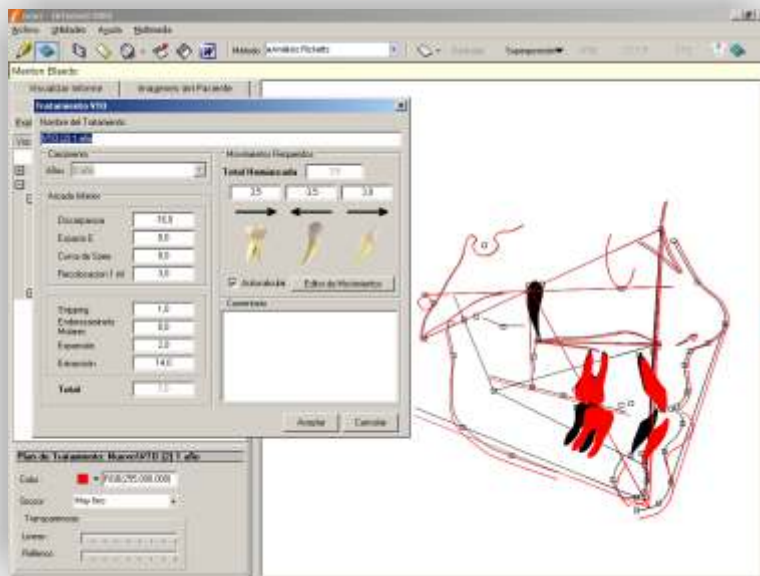

S.T.O. Módulo Cirúrgico

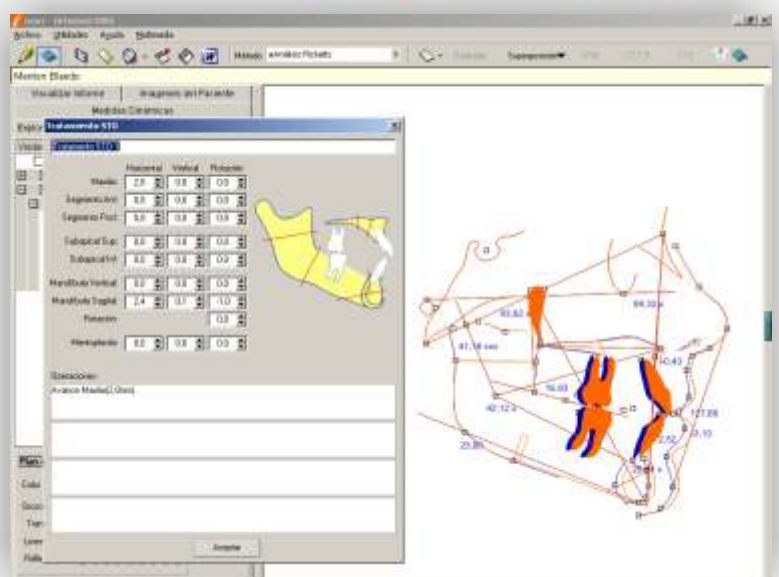


Defina os movimentos pretendidos, e registre os objectivos previstos

Software de Análise Cefalométrica e Plano de Tratamento Ortodôntico

Warping e Morphing




Estudo Avançado de Modelos

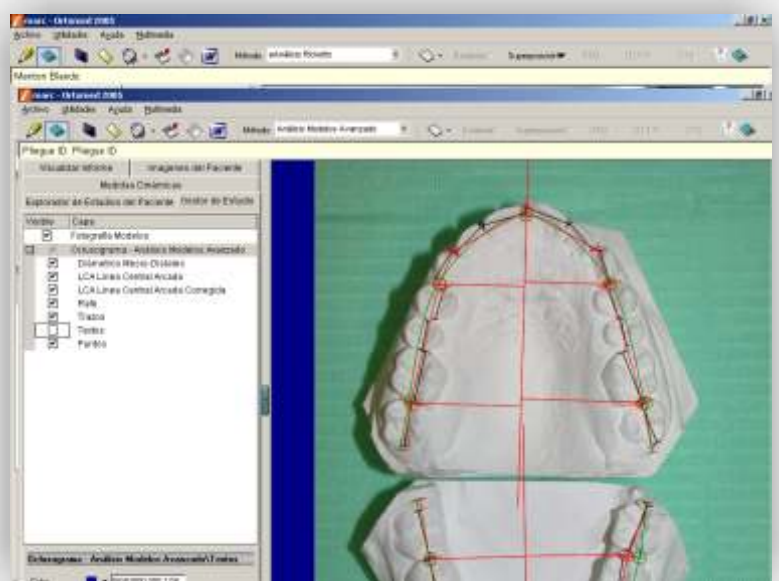

Mostre ao paciente os diferentes perfis em função do Plano Tratamento seleccionado

Software de Análise Cefalométrica e Plano de Tratamento Ortodôntico

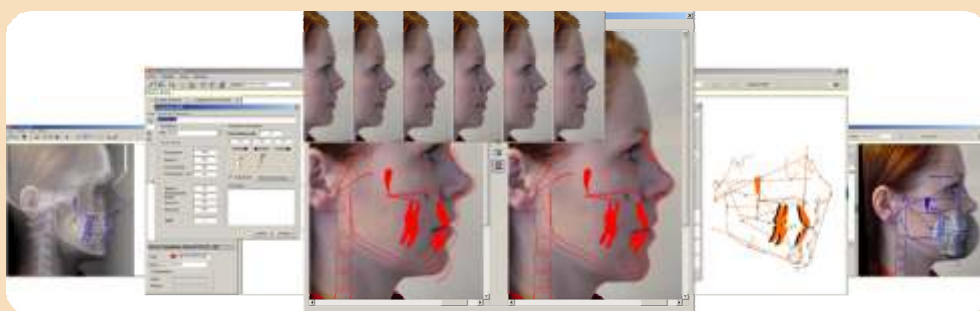

Análise Cefalométrica e Plano de Tratamento

- dispõe de mais de 50 sistemas de análise cefalométrica, incluindo laterais, frontais e tecidos moles
- análise de modelos: Bolton e Análise de discrepâncias dentoalveolares
- potentes ferramentas para a melhoria e ajuste das imagens (brilho, contraste, zoom, ...)
- sobreposição de diversos traçados cefalométricos, e também sobre as fotos do paciente
- rotação do cefalograma para ajuste ao plano de Frankfurt
- V.T.O. Predição do crescimento
- S.V.T.O. Cirurgia ortognática
- Morphing e Warping
- efeito transparência da fotografia com a radiografia
- impressão dos relatórios e estudos totalmente individualizáveis

PREÇO ORTOMED

1.690,00 €

IVA não incluído

Mais informações em www.ortomed.net, ou através do seu Consultor Comercial ORTHO PORTUGAL

Contrato Anual de Manutenção - 300,00 € (inclui suporte e actualizações)
Licença adicional - 150,00 €