


Carriere LX

Bracket Auto-Ligável

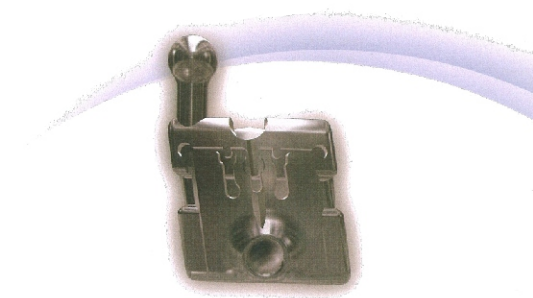

1. Colagem

Utilize a sua técnica convencional de colagem.

A Carriere LX tem uma base com micro-ranuras especialmente desenhadas para melhorar a ligação ao dente.

2. Posicionamento

Pela sua forma rombóide, a Carriere LX é de fácil ajuste ao eixo do dente.



Colocação bracket
no dente



Cada bracket tem um código
colorido específico, para mais
fácil identificação.

3. Abrir mecanismo Auto-Ligável



Utilize a ponta do instrumento próprio para
manuseamento da Carriere LX (ou semelhante), e
aplique uma força ligeira para baixo.

4. Colocação do Arco



Utilize novamente o
instrumento da Carriere
LX, para auxiliar na
colocação do arco.



Certifique-se que todo
o arco está bem
colocado antes de
fechar o mecanismo.

5. Fechar mecanismo Auto-Ligável



Feche o mecanismo Auto-Ligável
pressionando com o seu dedo
para cima.